


# PORTE-FILTRE | EMBOUT MASQUE DECATHLON

1

## PORTE-FILTRE



- A** Pièce A : embout-decat-porte-filtre-tissu-sup.stl
- B** Pièce B : embout-decat-porte-filtre-tissu-inf.stl

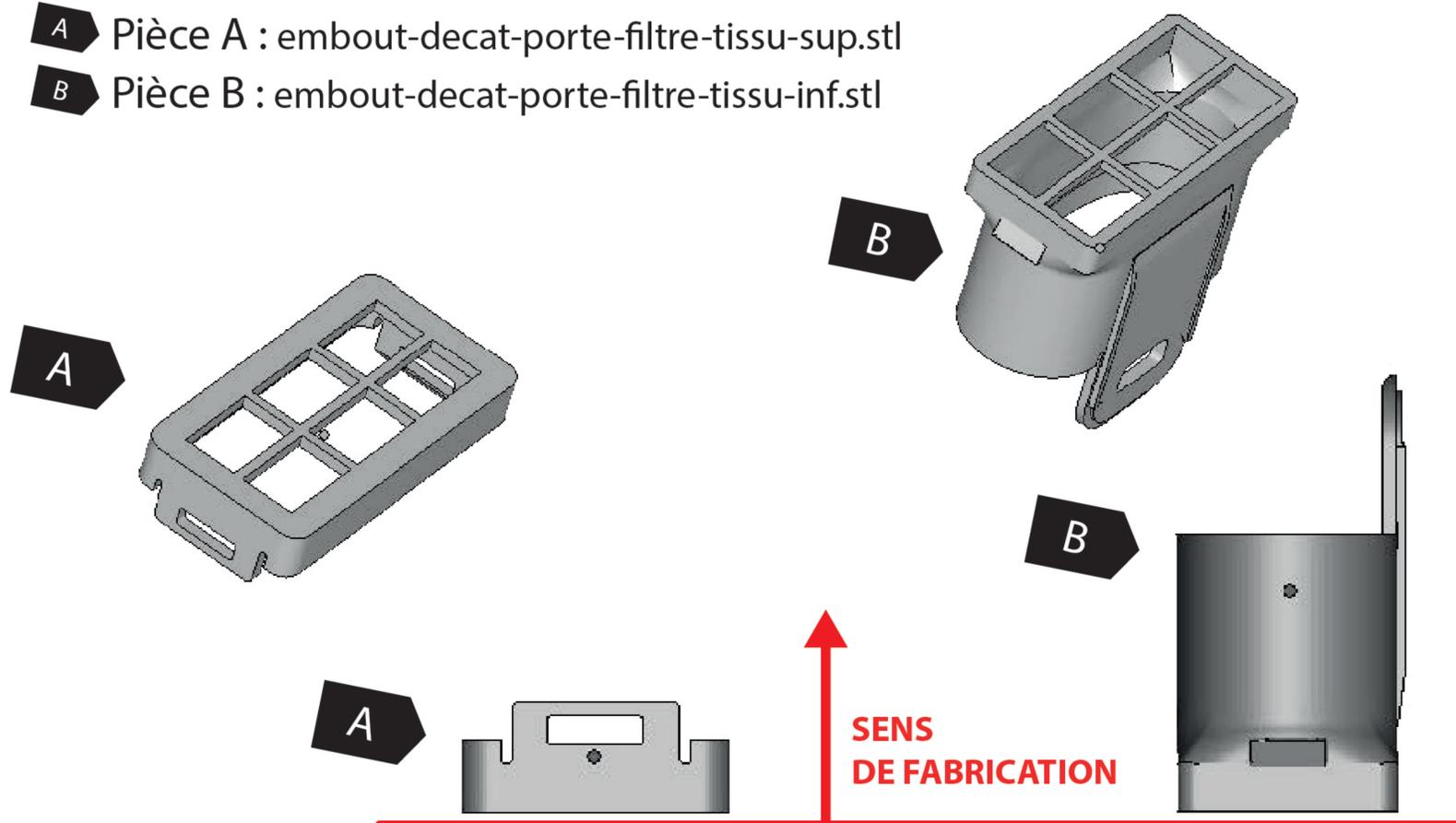

2

## FILTRE


- C1** Matière : Tissu double FFP2 - Poche de sterilisation
- C2** Filtre : découper un rectangle de 55 x 30 mm minimum

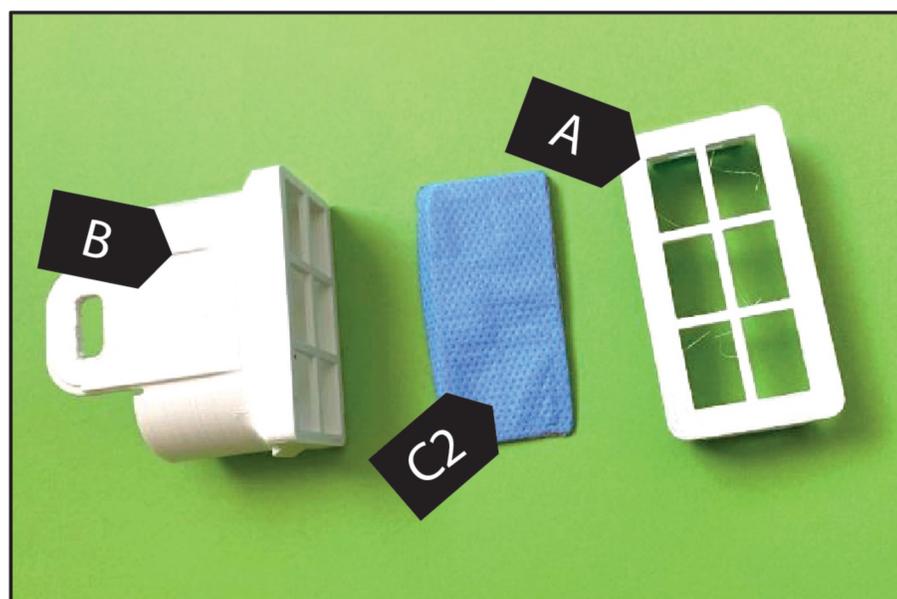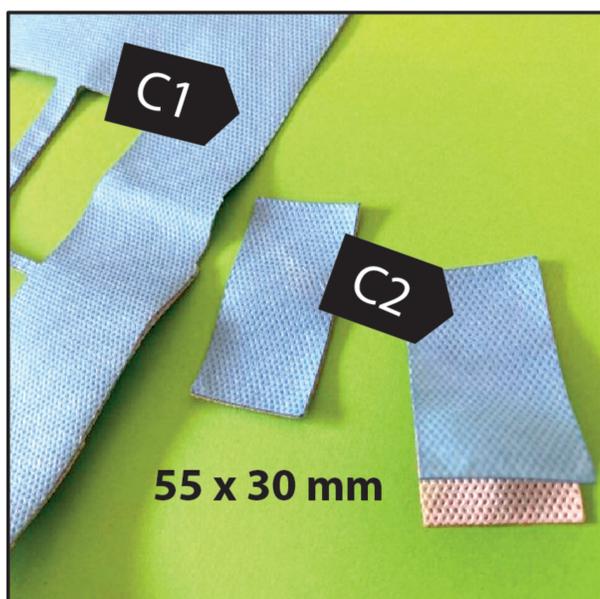

# PORTE-FILTRE | EMBOUT MASQUE DECATHLON

3


Positionner le filtre (C2) dans la pièce supérieure (A) du porte filtre

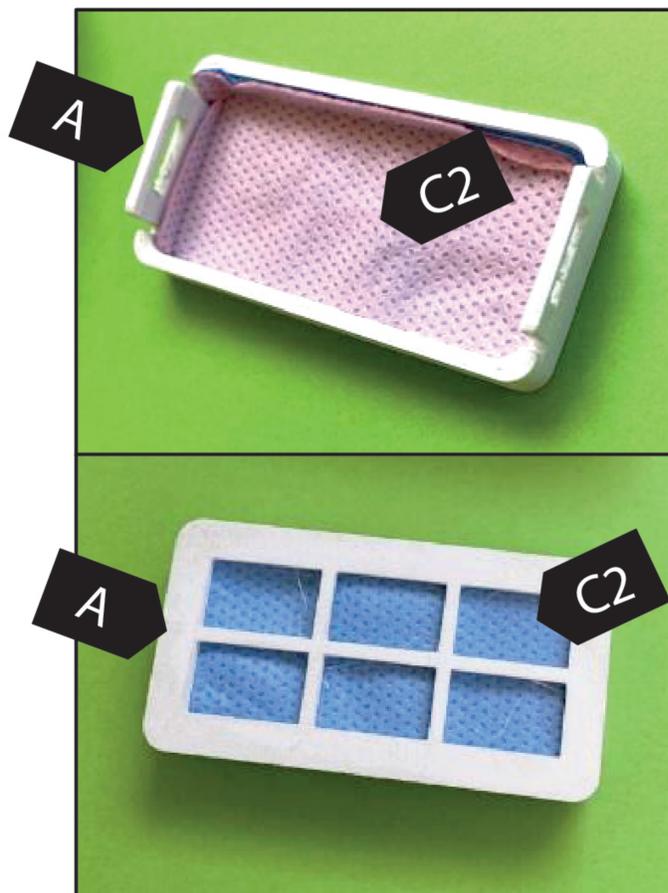

**CÔTÉ BLEU A L'EXTERIEUR**

4

Clipper la Pièce supérieure (A) sur la Pièce inférieure (B)

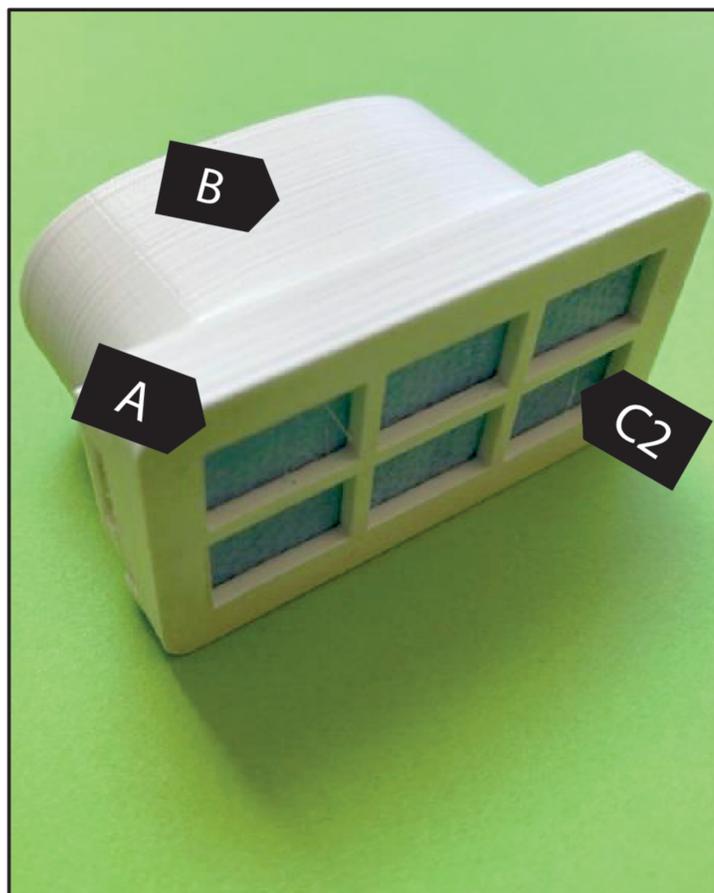

5

Monter l'ensemble PORTE-FILTRE sur le masque



**CHANGER LE FILTRE TOUTES LES 7 HEURES MAXI**